

# DaysyView 2.0

## Aktualisierung und Synchronisation

1




Bitte aktualisiere DaysyView über den entsprechenden Store.

2



Bestätige die Datenschutzbestimmungen und klicke auf den Pfeil, um zum nächsten Schritt zu kommen.

3

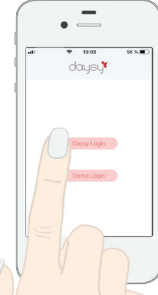

Wähle den „Daysy-Login“. Der „Demo-Login“ ist mit Musterdaten zur Ansicht gefüllt.

4




Verbinde Daysy mit dem Smartphone, damit sich DaysyView die Seriennummer Deines Gerätes ziehen kann.

5



Gib Deine Email-Adresse ein und bestätige sie. Dir wird ein fünfstelliger Code an die angegebene Email-Adresse zugesendet.

6

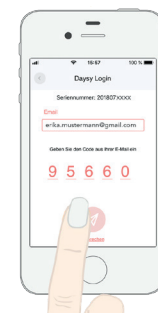

Trage den Code aus der Dir zugesendeten E-Mail ein und bestätige die Angaben.

7




Die Aktualisierung ist abgeschlossen, wenn ein leerer Kalender erscheint - Du kannst jetzt mit der Synchronisation starten.

8



Verbinde Dein Smartphone mit Daysy und wecke sie auf. Die Synchronisation beginnt automatisch. Bitte habe etwas Geduld. Sollte Daysy einschlafen, aktiviere sie.

9

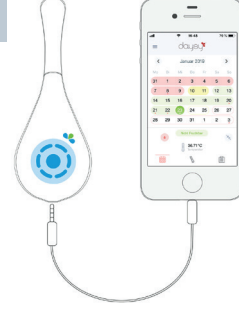

Ist der aktuelle Tag farbig markiert, kannst Du das Kabel abstecken. Achte darauf, dass Daysy wach ist.